

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/nozyczki-mayo-stille-wybor-rozmiarow-15cm-17cm-19cm-21cm-p-399.html>



Nożyczki MAYO-STILLE - (wybór rozmiarów: 15cm, 17cm, 19cm, 21cm)

Cena brutto **17,17 zł**

Cena netto **15,90 zł**

Opis produktu

✂ Nożyczki MAYO-STILLE

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu nożyczki MAYO-STILLE, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzia chirurgiczne wielokrotnego użytku, mogą być poddawany procesowi sterylizacji.

Posiadamy w sprzedaży następujące rodzaje nożyczek MAYO-STILLE:

- **dostępne długości:** 15cm, 17cm, 19cm, 21cm
- rodzaje: **proste** lub **zagięte**

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych

Profesjonalne **nożyczki chirurgiczne MAYO-STILLE** o długości **15 cm** to wysokiej klasy narzędzie medyczne wykonane z **trwałej stali nierdzewnej**. Przeznaczone do cięcia tkanek miękkich, materiałów opatrunkowych, szwów i innych zastosowań zabiegowych. Model **prosty** zapewnia doskonałą kontrolę i precyzję podczas pracy.

☑ Specyfikacja produktu:

- **Rodzaj:** nożyczki chirurgiczne MAYO-STILLE
- **Typ:** proste
- **Długość całkowita:** 15 cm
- **Materiał:** stal nierdzewna chirurgiczna
- **Powierzchnia:** matowa (antyodblaskowa)
- **Krawędzie tnące:** precyzyjnie ostrzone
- **Możliwość sterylizacji:** tak (autoklaw, środki chemiczne)
- **Wielokrotnego użytku:** tak

☑ Zastosowanie:

- chirurgia ogólna i zabiegi ambulatoryjne
- gabinety lekarskie, weterynaryjne i kosmetyczne
- pierwsza pomoc, ratownictwo medyczne
- laboratoria i zastosowania edukacyjne

☑ Zalety produktu:

- ✓ wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej odpornej na korozję
- ✓ solidne, trwałe ostrza o wysokiej precyzji cięcia
- ✓ wygodny chwyt zapewniający pewną kontrolę

-
- ✓ matowe wykończenie – brak odbłasków podczas pracy
 - ✓ możliwość wielokrotnej sterylizacji i długotrwałego użytkowania

W naszym sklepie mogą Państwo także zakupić inne nożyczki chirurgiczne tj.:

[WERTHIEM](#), [DOYEN](#), [MAYO-NOBLE](#), [MAYO-STILLE](#), [CUTICLE](#), [BRUNS](#), [IRIS](#), [JOSEPH](#), [SPENCER](#), [LITTAUER](#), [METZENBAUM](#), [METZENBAUM-NELSON](#), [MAYO](#), [STRABISMUS](#), [QUINBY](#), [LISTER](#), [HEYMANN](#) i wiele innych instrumentów chirurgicznych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: proste , zagięte

Długość: 15cm , 17cm , 19cm , 21cm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmmedicaldevices.com

☐ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl

