

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/nozyczki-metzenbaum-nelson-30cm-ostroostre-proste-p-692.html>

## Nożyczki METZENBAUM-NELSON 30cm, ostro/ostre, proste



Cena brutto **33,37 zł**

Cena netto **30,90 zł**

### Opis produktu

## Nożyczki preparacyjne METZENBAUM, ostro/ostre 30cm proste

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu nożyczki preparacyjne METZENBAUM ostro/ostre, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej.

Certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

### Opis produktu

**Nożyczki preparacyjne METZENBAUM ostro/ostre 30 cm - proste** to instrument chirurgiczny przeznaczony do preparowania i cięcia tkanek. Charakteryzują się smukłą konstrukcją, wydłużonym ramieniem, dzięki czemu są standardem w chirurgii ogólnej i specjalistycznej.

### Najważniejsze cechy

- **Długość:** 30 cm
- **Końcówki ostre/ostre (O/O)** - zapewniają wyjątkową precyzję
- **Prosta konstrukcja** - idealna do manewrowania w głąb pola operacyjnego
- **Stal nierdzewna klasy medycznej** - odporna na korozję oraz środki dezynfekujące
- **Możliwość sterylizacji** we wszystkich standardowych metodach
- **Przeznaczone do zabiegów chirurgicznych i preparacyjnych**

### Zastosowanie

Nożyczki METZENBAUM świetnie sprawdzają się podczas:

- precyzyjnego preparowania tkanek miękkich
- cięcia tkanek delikatnych
- zabiegów chirurgicznych ogólnych i specjalistycznych
- pracy w warunkach klinicznych i salach operacyjnych
- weterynaria

### Atesty i zgodność

- ✓ Certyfikowany **wyrób medyczny**

- 
- ✓ Spełnia normy dla narzędzi chirurgicznych
  - ✓ Odpowiednie do profesjonalnego użytku klinicznego

Na naszych pozostałych aukcjach Allegro mogą Państwo także zakupić inne nożyczki chirurgiczne tj.:

[WERTHIEM](#), [DOYEN](#), [MAYO-NOBLE](#), [MAYO-STILLE](#), [CUTICLE](#), [BRUNS](#), [IRIS](#), [JOSEPH](#), [SPENCER](#), [LITTAUER](#), [METZENBAUM](#), [METZENBAUM-NELSON](#), [MAYO](#), [STRABISMUS](#), [QUINBY](#), [LISTER](#), [HEYMANN](#) i wiele innych instrumentów chirurgicznych.

## Bezpieczeństwo

**OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.**

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszuszyć dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

## Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:  
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,  
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan  
e-mail: [info@weldoninstruments.com](mailto:info@weldoninstruments.com)

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:  
CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania  
e-mail: [info@cmcmedicaldevices.com](mailto:info@cmcmedicaldevices.com)

☐ Importer i dystrybutor:  
F.H.U. MONAMED  
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo  
tel. 603-477-248  
e-mail: [monamed@monamed.pl](mailto:monamed@monamed.pl)