
Link do produktu: <https://www.monamed.pl/nozyczki-metzenbaum-nelson-preparacyjne-tępo/tępe-wybor-rozmiarow-18cm-30cm-p-389.html>



Nożyczki METZENBAUM-NELSON preparacyjne tępo/tępe - (wybór rozmiarów: 18cm, 30cm)

Cena brutto	17,17 zł
Cena netto	15,90 zł

Opis produktu

✂️ Nożyczki preparacyjne METZENBAUM-NELSON tępo/tępe

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu nożyczki preparacyjne METZENBAUM-NELSON tępo/tępe, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Opis produktu

Nożyczki **Metzenbaum-Nelson** to wysokiej jakości narzędzie chirurgiczne zaprojektowane do **delikatnego i precyzyjnego preparowania oraz cięcia tkanek miękkich**. Model o końcówkach **tępym-tępym** i konstrukcji która zapewnia bezpieczeństwo pracy oraz minimalizuje ryzyko uszkodzeń okolicznych struktur.

Parametry techniczne

- **Długość całkowita:** 18cm, 30 cm
- **Rodzaj końcówek:** tępo - tępe
- **Konstrukcja:** proste lub zagięte
- **Materiał:** stal nierdzewna / stal chirurgiczna
- **Zastosowanie:** zabiegi chirurgiczne, operacyjne i zabiegowe

Najważniejsze cechy

- Precyzyjne ostrza zapewniające kontrolowane cięcie
 - Stabilny i wygodny chwyt umożliwiający pracę w głębokich polach operacyjnych
 - Możliwość sterylizacji w autoklawie
 - Narzędzie wielorazowego użytku
 - Wysoka odporność na korozję i uszkodzenia mechaniczne
-

☐ Informacje dodatkowe

Produkt jest **wyrobem medycznym**, przeznaczonym do stosowania przez **wykwalfikowany personel medyczny**.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: proste , zagięte

Długość: 18cm , 30cm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszus dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

☐ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl