

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/nozyczki-metzenbaum-preparacyjne-tepetepe-wybor-rozmiarow-11cm-14cm-15cm-p-385.html>



Nożyczki METZENBAUM preparacyjne tępę/tępę - (wybór rozmiarów: 11cm, 14cm, 15cm)

Cena brutto	10,69 zł
Cena netto	9,90 zł

Opis produktu

✂ Nożyczki preparacyjne METZENBAUM tępę/tępę

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu nożyczki preparacyjne METZENBAUM ostro/ostre, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej.

Certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Opis produktu

Profesjonalne **nożyczki preparacyjne METZENBAUM** to precyzyjne narzędzie chirurgiczne przeznaczone do **preparowania i przecinania delikatnych tkanek miękkich** podczas zabiegów chirurgicznych, stomatologicznych oraz weterynaryjnych.

Dzięki **zagiętym ramionom** zapewniają doskonałą widoczność pola operacyjnego, a **tępę zakończenia** minimalizują ryzyko przypadkowego uszkodzenia tkanek. Wykonane ze **stali nierdzewnej chirurgicznej**, gwarantują trwałość, odporność na korozję oraz możliwość wielokrotnej sterylizacji.

⚙ Specyfikacja techniczna

Opis Cecha

Opis

Długość całkowita: 11cm, 14cm, 15cm

Materiał: Stal nierdzewna chirurgiczna

Rodzaj ostrzy: Tępę/tępę

Kształt: Zagięte lub proste

Sterylizacja: Tak - autoklaw / środki chemiczne

Zastosowanie: Chirurgia, stomatologia, weterynaria

Stan produktu: Nowy

Najważniejsze cechy produktu

Opis Cechy

Opis

-
- ☐ **Stal nierdzewna chirurgiczna:** Odporna na korozję i środki dezynfekcyjne
 - ∞ **Precyzyjne ostrza tępo/tępe:** Bezpieczne cięcie i preparowanie tkanek
 - ☐ **Zagięty kształt:** Ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach
 - ♻ **Sterylizowalny:** Możliwość wielokrotnego użytku po autoklawowaniu
 - ☐ **Zastosowanie profesjonalne:** Chirurgia, stomatologia, medycyna weterynaryjna

Na naszym sklepie mogą Państwo także zakupić inne nożyczki chirurgiczne tj.:

[WERTHIEM](#), [DOYEN](#), [MAYO-NOBLE](#), [MAYO-STILLE](#), [CUTICLE](#), [BRUNS](#), [IRIS](#), [JOSEPH](#), [SPENCER](#), [LITTAUER](#), [METZENBAUM](#), [METZENBAUM-NELSON](#), [MAYO](#), [STRABISMUS](#), [QUINBY](#), [LISTER](#), [HEYMANN](#) i wiele innych instrumentów chirurgicznych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: proste , zagięte
Długość: 11cm , 14cm , 15cm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl