

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/nozyczki-potts-smith-190cm-katowe-wybor-katow-25-40-60-p-409.html>



Nożyczki POTTSMITH 19.0cm kątowe - (wybór kątów: 25°, 40°, 60°)

Cena brutto **20,41 zł**

Cena netto **18,90 zł**

Opis produktu

Nożyczki POTTSMITH kątowe 19.0cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu nożyczki kątowe POTTSMITH 19.0cm, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Nożyczki kątowe POTTSMITH powszechnie stosowane do przycinania i otwierania naczyń w procedurach sercowo-naczyniowych, procedurach klatki piersiowej oraz innych przeprowadzanych w ograniczonej przestrzeni. Nożyczki chirurgiczne POTTSMITH mają zastosowanie w następujących dziedzinach: chirurgia sercowo-naczyniowa, chirurgia klatki piersiowej, chirurgia ogólna

W sprzedaży posiadamy następujące rodzaje nożyczek kątowych POTTSMITH 19.0cm:

- 25°,
- 40°,
- 60°

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych

W naszym sklepie Państwo także zakupić inne nożyczki chirurgiczne tj.:

[WERTHIEM](#), [DOYEN](#), [MAYO-NOBLE](#), [MAYO-STILLE](#), [CUTICLE](#), [BRUNS](#), [IRIS](#), [JOSEPH](#), [SPENCER](#), [LITTAUER](#), [METZENBAUM](#), [METZENBAUM-NELSON](#), [MAYO](#), [STRABISMUS](#), [QUINBY](#), [LISTER](#), [HEYMANN](#) i wiele innych instrumentów chirurgicznych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Odchylenie kątowe: 25° , 40° , 60°

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.

-
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
 3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
 4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
 5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
 6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
 7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
 8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
 9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
 10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl