

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/nozyczki-werthiem-wybor-rozmiarow-140cm-22cm-p-368.html>

Nożyczki WERTHIEM - wybór rozmiarów (14.0cm, 22cm)



Cena brutto **16,09 zł**

Cena netto **14,90 zł**

Opis produktu

✂ Nożyczki WERTHIEM, zagięte

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu nożyczki WERTHIEM, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

📄 Opis produktu

Nożyczki **WERTHIEM (zagięte)** to wysokospecjalistyczne narzędzie chirurgiczne przeznaczone do precyzyjnego cięcia tkanek. Ich wygięta konstrukcja zapewnia doskonałą widoczność pola operacyjnego oraz ułatwia pracę w trudno dostępnych miejscach.

Nożyczki chirurgiczne WERTHIEM do zabiegów i operacji chirurgicznych.

📄 Najważniejsze cechy

- 📄 **Długość: 14cm, 22cm**
- 📄 **Zagięte ostrza** - lepsza ergonomia i kontrola cięcia
- 📄 **Wysokiej jakości stal nierdzewna** - trwałość i odporność na korozję
- 📄 **Ergonomiczny uchwyt** - pewny chwyt i precyzja ruchów
- 📄 **Wielokrotna sterylizacja (autoklaw)**
- 📄 Dostosowane do zastosowań chirurgii ogólnej i specjalistycznej
- ✂ końcówki tępo/tępe

📄 Zastosowanie

- Chirurgia ogólna
- Chirurgia ginekologiczna
- Chirurgia naczyniowa
- Prace preparacyjne i zabiegowe
- Zabiegi ambulatoryjne

📄 Status produktu

- ✓ **Wyrób medyczny**
- ✓ Produkt fabrycznie nowy
- ✓ Spełnia normy jakości CE

📄 Zalety korzystania z nożyczek operacyjnych WERTHIEM

- wysokie bezpieczeństwo pracy
- dobre prowadzenie
- proste w użytkowaniu

-
- dobre naostrzenie części tnących

Pełna oferta sklepu na nożyczki chirurgiczne o różnych wymiarach. Dostępne także inne produkty z końcówkami ostro/tępymi, ostro/ostryimi i tępo/tępymi. Nożyczki są poddawane weryfikacji zarówno w produkcji, jak i przed wysłaniem zamówienia. Bezpiecznie zapakowane.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych

Na naszych pozostałych aukcjach Allegro mogą Państwo także zakupić inne nożyczki chirurgiczne tj.:

[WERTHIEM](#), [DOYEN](#), [MAYO-NOBLE](#), [MAYO-STILLE](#), [CUTICLE](#), [BRUNS](#), [IRIS](#), [JOSEPH](#), [SPENCER](#), [LITTAUER](#), [METZENBAUM](#), [METZENBAUM-NELSON](#), [MAYO](#), [STRABISMUS](#), [QUINBY](#), [LISTER](#), [HEYMANN](#) i wiele innych instrumentów chirurgicznych.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Długość: 14.0cm , 22.0cm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszuszyć dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

☐ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl

