

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/odgryzacz-kostny-luer-dlugosc-170cm-p-433.html>



Odgryzacz kostny LUER, długość 17.0cm

Cena brutto **59,29 zł**

Cena netto **54,90 zł**

Opis produktu

ODGRYZACZ KOSTNY LUER 17.0cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu odgryzacz kostny LUER 17cm, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Opis produktu

Odgryzacz kostny typu LUER o długości 17 cm w wersji prostej to specjalistyczne narzędzie chirurgiczne przeznaczone do precyzyjnego usuwania i modelowania tkanki kostnej. Znajduje zastosowanie w procedurach wymagających kontrolowanego odcinania fragmentów kości.

Instrument wykonany jest z wysokogatunkowej stali chirurgicznej, co zapewnia trwałość oraz odporność na intensywne użytkowanie i wielokrotne procesy sterylizacji. Solidna konstrukcja oraz ergonomiczny uchwyt umożliwiają stabilną i bezpieczną pracę.

Najważniejsze zalety

- Precyzyjne cięcie i usuwanie fragmentów tkanki kostnej
- Wysokiej jakości stal chirurgiczna odporna na zużycie
- Narzędzie wielokrotnego użytku - możliwość sterylizacji
- Długość 17 cm zapewniająca dobrą kontrolę pracy
- Konstrukcja prosta do pracy w standardowym polu operacyjnym

Specyfikacja techniczna

- Długość: 17,0 cm
- Materiał: stal chirurgiczna
- Typ: prosty lub zagięty
- Wielorazowego użytku: tak
- Możliwość sterylizacji: tak (autoklaw)
- Typ narzędzia: odgryzacz kostny LUER
- Klasa wyrobu: wyrób medyczny

Zastosowanie

Odgryzacz przeznaczony jest do zastosowań medycznych, w szczególności:

- w chirurgii stomatologicznej
- w chirurgii szczękowo-twarzowej
- do usuwania i modelowania tkanki kostnej
- w szpitalach, klinikach i gabinetach specjalistycznych

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku przez wykwalifikowany personel medyczny.

☐☐ **Bezpieczeństwo i certyfikaty**

- ☐☐ Produkt spełnia wymagania dla wyrobów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami
- ☐ Oznakowanie CE (jeśli dotyczy – zgodnie z dokumentacją producenta)
- ⚠ Wyrób medyczny – stosować zgodnie z instrukcją użytkowania
- ⚠ Przed użyciem należy przeprowadzić mycie, dezynfekcję i sterylizację
- ⚠ Nie używać w przypadku uszkodzenia mechanizmu lub ostrzy
- ⚠ Produkt przeznaczony wyłącznie dla personelu medycznego

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj: prosty , zagięty

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszuszyć dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

☐ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl