

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/osteotom-kostny-mini-lambotte-dlugosc-125cm-wybor-rozmiarow-3mm-4mm-6mm-p-442.html>



Osteotom kostny MINI-LAMBOTTE, długość 12.5cm - (wybór rozmiarów: 3mm, 4mm, 6mm)

Cena brutto	32,29 zł
Cena netto	29,90 zł

Opis produktu

OSTEOTOM KOSTNY MINI-LAMBOTTE 12.5cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu osteotom kostny MINI-LAMBOTTE 12.5cm, które wykonane jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Osteotom - [narzędzie chirurgiczne](#) w kształcie dłuta z obustronnie ściętym ostrzem, służące do przecinania kości.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Dostępne szerokości osteotomu MINI-LAMBOTTE w sprzedaży:

- 3mm,
- 4mm,
- 6mm.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Szerokość osteotomu: 3mm , 4mm , 6mm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.

-
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
 9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
 10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl