

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/piłka-kostna-gigli-wybor-dlugosci-30cm-40cm-50cm-60cm-70cm-p-469.html>



## Piłka kostna GIGLI - (wybór długości: 30cm, 40cm, 50cm, 60cm, 70cm)

Cena brutto **20,41 zł**

Cena netto **18,90 zł**

### Opis produktu

## PIŁKA KOSTNA GIGLI

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu piłkę kostną GIGLI, która wykonana jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

### Opis produktu

Profesjonalna **piłka chirurgiczna GIGLI** to wysokiej jakości narzędzie tnące, stosowane do **przecinania kości podczas zabiegów ortopedycznych i chirurgicznych**. Wykonana z **elastycznej stali nierdzewnej**, zapewnia **płynne, precyzyjne cięcie** oraz **pełną kontrolę** w trakcie pracy.

Piłka może być stosowana z prowadnicą lub uchwytami do pił GIGLI. Przystosowana do **wielokrotnej sterylizacji** - odporna na działanie autoklawu i środków dezynfekcyjnych.

### Specyfikacja techniczna

#### Cecha

#### Opis

**Długość całkowita:** 30cm, 40cm, 50cm, 60cm, 70cm

**Materiał:** Stal nierdzewna chirurgiczna

**Rodzaj narzędzia:** Piłka chirurgiczna (drutowa)

**Sterylizacja:** Tak - autoklaw / środki chemiczne

**Zastosowanie:** Chirurgia, ortopedia, weterynaria

**Stan:** Nowa

### Najważniejsze cechy produktu

#### Cechy

#### Opis

**Stal nierdzewna chirurgiczna:** Odporna na korozję i środki dezynfekcyjne

- 
- ☐ **Elastyczna konstrukcja:** Umożliwia precyzyjne cięcie kości
  - ☐ **Wysoka kontrola pracy:** Idealna do zabiegów wymagających dokładności
  - ⚙ **Sterylizowalna:** Możliwość autoklawowania i dezynfekcji chemicznej
  - ☐ **Zastosowanie profesjonalne:** Chirurgia ortopedyczna, weterynaria

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Długość piłki:** 30cm , 40cm , 50cm , 60cm , 70cm

## Bezpieczeństwo

**OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.**

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszuszyć dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

## Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:  
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,  
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan  
e-mail: [info@weldoninstruments.com](mailto:info@weldoninstruments.com)

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:  
CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania  
e-mail: [info@cmcmmedicaldevices.com](mailto:info@cmcmmedicaldevices.com)

☐ Importer i dystrybutor:  
F.H.U. MONAMED  
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo  
tel. 603-477-248  
e-mail: [monamed@monamed.pl](mailto:monamed@monamed.pl)

