

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/pilnik-kostny-lewis-dlugosc-180cm-p-462.html>



Pilnik kostny LEWIS, długość 18.0cm

Cena brutto **36,72 zł**

Cena netto **34,00 zł**

Opis produktu

Pilnik kostny LEWIS 18.0cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu pilnik kostny LEWIS 18.0cm który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Opis produktu

Pilnik kostny typu LEWIS o długości 18 cm to specjalistyczne narzędzie chirurgiczne przeznaczone do opracowywania i wygładzania powierzchni kostnych podczas zabiegów. Znajduje zastosowanie w chirurgii stomatologicznej, szczękowo-twarzowej oraz innych procedurach wymagających precyzyjnej obróbki kości.

Wykonany z wysokogatunkowej stali chirurgicznej, pilnik charakteryzuje się trwałością oraz odpornością na wielokrotne procesy dezynfekcji i sterylizacji. Ergonomiczny uchwyt zapewnia stabilność i kontrolę podczas pracy, co ma istotne znaczenie w zabiegach wymagających wysokiej precyzji.

Najważniejsze zalety

- Precyzyjne opracowywanie i wygładzanie struktur kostnych
- Wykonanie z wysokiej jakości stali chirurgicznej
- Konstrukcja umożliwiająca wielokrotne użycie
- Długość 18 cm zapewniająca kontrolę i ergonomię pracy
- Narzędzie przeznaczone do profesjonalnych procedur chirurgicznych

Specyfikacja techniczna

- Długość: 18,0 cm
- Materiał: stal chirurgiczna
- Wielorazowego użytku: tak
- Możliwość sterylizacji: tak (autoklaw)
- Typ narzędzia: pilnik kostny LEWIS
- Klasa wyrobu: wyrób medyczny

Zastosowanie

Pilnik kostny przeznaczony jest do zastosowań medycznych, w szczególności:

- w chirurgii stomatologicznej
- w chirurgii szczękowo-twarzowej
- do wygładzania i opracowywania tkanki kostnej
- w szpitalach, klinikach i gabinetach specjalistycznych

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku przez wykwalifikowany personel medyczny.

☐☐ **Bezpieczeństwo i certyfikaty**

- ☐☐ Produkt spełnia wymagania dla wyrobów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami
- ☐ Oznakowanie CE (jeśli dotyczy – zgodnie z dokumentacją producenta)
- △ Wyrób medyczny – używać zgodnie z instrukcją użytkownika
- △ Przed użyciem wymagane jest mycie, dezynfekcja i sterylizacja
- △ Nie stosować w przypadku uszkodzenia powierzchni roboczej
- △ Produkt przeznaczony wyłącznie dla personelu medycznego

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszuszyć dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

☐ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl