

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/pinceta-adson-brown-12cm-z-zabkami-p-473.html>



## Pinceta ADSON-BROWN 12cm z ząbkami

|             |                |
|-------------|----------------|
| Cena brutto | <b>9,72 zł</b> |
| Cena netto  | <b>9,00 zł</b> |

### Opis produktu

## Pinceta ADSON-BROWN 12cm z ząbkami

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu pinceta ADSON-BROWN 12cm z ząbkami, która wykonana jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

### Opis produktu

Profesjonalna **pinceta chirurgiczna ADSON-BROWN 12 cm** to precyzyjne narzędzie używane do **delikatnego chwytania i utrzymywania tkanek** podczas zabiegów chirurgicznych. Wyposażona w **precyzyjne ząbki na końcówkach**, które gwarantują **pewny chwyt bez poślizgu** i minimalizują uszkodzenia tkanek.

Wykonana z **wysokiej jakości stali nierdzewnej chirurgicznej**, odpornej na korozję, sterylizację i środki dezynfekcyjne. Idealna do zastosowań w chirurgii, stomatologii, weterynarii i kosmetologii.

#### Specyfikacja techniczna

##### Cecha

##### Opis

**Długość całkowita:** 12.0 cm

**Rodzaj końcówki:** Ząbkowana (dla pewnego chwytu)

**Materiał:** Stal nierdzewna chirurgiczna

**Sterylizacja:** Tak – autoklaw / środki chemiczne

**Zastosowanie:** Chirurgia, stomatologia, kosmetologia, weterynaria

**Stan:** Nowa

### Najważniejsze cechy produktu

##### Cechy

##### Opis

**Stal nierdzewna chirurgiczna:** Odporna na korozję i środki dezynfekcyjne

- 
- ☐ **Końcówki z ząbkami:** Zapewniają pewny chwyt i precyzyjną pracę
  - ☐ **Ergonomiczny uchwyt:** Wygodne, antypoślizgowe żłobienia na rączkach
  - ♻️ **Sterylizowalna:** Przystosowana do autoklawowania i dezynfekcji chemicznej
  - ☐ **Zastosowanie profesjonalne:** Chirurgia, stomatologia, kosmetologia, weterynaria

W naszym sklepie mogą Państwo także zakupić pincety anatomiczne w rozmiarach: 11.5cm, 13cm, 14cm, 15cm, 16cm, 18cm, 20cm, 25cm, 30cm, 40cm, 50cm,

A także pincety, pęsety, pencety: [POTTS-SMITH](#), [GERALD](#), [CUSHING](#), [SEMKEN](#), [ADSON](#), [MICRO-ADSON](#), [TAYLOR](#), [WACHENFELDT](#), [MERIAM](#), [LONDON-COLLAGE](#) i inne.

## Bezpieczeństwo

**OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.**

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

## Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:  
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,  
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan  
e-mail: [info@weldoninstruments.com](mailto:info@weldoninstruments.com)

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:  
CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania  
e-mail: [info@cmcmmedicaldevices.com](mailto:info@cmcmmedicaldevices.com)

☐ Importer i dystrybutor:  
F.H.U. MONAMED  
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo  
tel. 603-477-248  
e-mail: [monamed@monamed.pl](mailto:monamed@monamed.pl)

