

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/pinceta-adson-brown-z-zabkami-dlugosc-12cm-p-473.html>



Pinceta ADSON-BROWN z ząbkami, długość 12cm

Cena brutto **9,72 zł**

Cena netto **9,00 zł**

Opis produktu

Pinceta ADSON-BROWN 12cm z ząbkami

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu pinceta ADSON-BROWN 12cm z ząbkami, która wykonana jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Opis produktu

Profesjonalna **pinceta chirurgiczna ADSON-BROWN 12 cm** to precyzyjne narzędzie używane do **delikatnego chwytania i utrzymywania tkanek** podczas zabiegów chirurgicznych. Wyposażona w **precyzyjne ząbki na końcówkach**, które gwarantują **pewny chwyt bez poślizgu** i minimalizują uszkodzenia tkanek.

Wykonana z **wysokiej jakości stali nierdzewnej chirurgicznej**, odpornej na korozję, sterylizację i środki dezynfekcyjne. Idealna do zastosowań w chirurgii, stomatologii, weterynarii i kosmetologii.

Specyfikacja techniczna

Cecha

Opis

Długość całkowita: 12.0 cm

Rodzaj końcówki: Ząbkowana (dla pewnego chwytu)

Materiał: Stal nierdzewna chirurgiczna

Sterylizacja: Tak – autoklaw / środki chemiczne

Zastosowanie: Chirurgia, stomatologia, kosmetologia, weterynaria

Stan: Nowa

Najważniejsze cechy produktu

Cechy

Opis

Stal nierdzewna chirurgiczna: Odporna na korozję i środki dezynfekcyjne

-
- ☐ **Końcówki z ząbkami:** Zapewniają pewny chwyt i precyzyjną pracę
 - ☐ **Ergonomiczny uchwyt:** Wygodne, antypoślizgowe żłobienia na rączkach
 - ♻️ **Sterylizowalna:** Przystosowana do autoklawowania i dezynfekcji chemicznej
 - ☐ **Zastosowanie profesjonalne:** Chirurgia, stomatologia, kosmetologia, weterynaria

W naszym sklepie mogą Państwo także zakupić pincety anatomiczne w rozmiarach: 11.5cm, 13cm, 14cm, 15cm, 16cm, 18cm, 20cm, 25cm, 30cm, 40cm, 50cm,

A także pincety, pęsety, pencety: [POTTS-SMITH](#), [GERALD](#), [CUSHING](#), [SEMKEN](#), [ADSON](#), [MICRO-ADSON](#), [TAYLOR](#), [WACHENFELDT](#), [MERIAM](#), [LONDON-COLLAGE](#) i inne.

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

☐ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl

