

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/pinceta-adson-z-zabkami-1x2-zab-wybor-rozmiarow-12cm-15cm-p-472.html>



## Pinceta ADSON, z ząbkami, 1x2 ząb - (wybór rozmiarów: 12cm, 15cm)

Cena brutto **7,45 zł**

Cena netto **6,90 zł**

### Opis produktu

## Pinceta chirurgiczna ADSON 1x2 zęby

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu pinceta chirurgiczna ADSON, która wykonana jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

### Opis produktu

Profesjonalna **pinceta chirurgiczna ADSON 1x2 zęby** to precyzyjne narzędzie używane w zabiegach chirurgicznych, stomatologicznych oraz weterynaryjnych. Konstrukcja z **precyzyjnym chwytem ząbkowym 1x2** zapewnia pewne, stabilne trzymanie tkanek bez ich uszkodzenia.

Wykonana z **wysokiej jakości stali nierdzewnej chirurgicznej**, odpornej na korozję i przystosowanej do wielokrotnej sterylizacji.

### Specyfikacja techniczna

#### Cecha

#### Opis

**Długość całkowita:** 12cm, 15 cm

**Materiał:** Stal nierdzewna chirurgiczna

**Końcówka:** 1x2 zęby

**Chwył:** Ryflowany - antypoślizgowy

**Sterylicacja:** Autoklaw / środki chemiczne

**Zastosowanie:** Chirurgia, stomatologia, weterynaria

**Stan produktu:** Nowy

### Najważniejsze cechy produktu

#### Cechy

#### Opis

- 
- ☐ **Stal nierdzewna chirurgiczna:** Trwała, odporna na korozję
  - ☐ **Końcówka 1×2 zęby:** Pewny chwyt tkanek bez poślizgu
  - ☐ **Ryflowany uchwyt:** Stabilność i precyzja pracy
  - ☸ **Wielokrotna sterylizacja:** Autoklawowanie i dezynfekcja chemiczna
  - ☐ **Przeznaczenie:** Zabiegi chirurgiczne i ambulatoryjne

W naszym sklepie mogą Państwo także zakupić pincety anatomiczne w rozmiarach: 11.5cm, 13cm, 14cm, 15cm, 16cm, 18cm, 20cm, 25cm, 30cm, 40cm, 50cm,

A także pincety, pęsety, pencyty: [POTTS-SMITH](#), [GERALD](#), [CUSHING](#), [SEMKEN](#), [ADSON](#), [MICRO-ADSON](#), [TAYLOR](#), [WACHENFELDT](#), [MERIAM](#), [LONDON-COLLAGE](#) i inne.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Długość:** 12cm , 15cm

## Bezpieczeństwo

**OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.**

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

## Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:  
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,  
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan  
e-mail: [info@weldoninstruments.com](mailto:info@weldoninstruments.com)

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:  
CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania

---

e-mail: [info@cmcmmedicaldevices.com](mailto:info@cmcmmedicaldevices.com)

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED

ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo

tel. 603-477-248

e-mail: [monamed@monamed.pl](mailto:monamed@monamed.pl)