

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/pinceta-chirurgiczna-cushing-175cm-1x2-zeby-p-487.html>

## Pinceta chirurgiczna CUSHING 17.5cm, 1x2 zęby



Cena brutto **9,61 zł**

Cena netto **8,90 zł**

### Opis produktu

## Pinceta chirurgiczna CUSHING 17.5cm z ząbkiem, 1x2 ząb

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu pincetę chirurgiczną CUSHING 17.5cm z ząbkiem, 1x2 ząb, która wykonana jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

### Opis produktu

Profesjonalna **pinceta chirurgiczna CUSHING 17.5 cm z ząbkiem (1x2)** to precyzyjne narzędzie stosowane w **chirurgii, mikrochirurgii oraz zabiegach naczyniowych**. Jej smukła, lekka konstrukcja oraz **delikatne ząbki 1x2** na końcówkach zapewniają **pewny i kontrolowany chwyt tkanek** bez ich uszkodzenia.

Wykonana w całości z **wysokogatunkowej stali nierdzewnej chirurgicznej**, jest odporna na korozję, środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę. Nadaje się do **wielokrotnego użytku** oraz **sterylizacji w autoklawie**, co czyni ją idealnym wyborem dla gabinetów, klinik i szpitali.

### Specyfikacja techniczna

#### Cecha

#### Opis

**Długość całkowita:** 17.5 cm

**Materiał:** Stal nierdzewna chirurgiczna

**Typ końcówki:** Ząbkowana 1x2

**Konstrukcja:** Smukła, lekka, antypoślizgowy uchwyt

**Sterylizacja:** Tak - autoklaw / środki chemiczne

**Zastosowanie:** Chirurgia, mikrochirurgia, zabiegi naczyniowe

**Stan produktu:** Nowy

### Najważniejsze cechy produktu

#### Cechy

#### Opis

---

☐ **Stal nierdzewna chirurgiczna:** Odporna na korozję i dezynfekcję

☐ **Ząbki 1x2:** Precyzyjny chwyt tkanek bez poślizgu

☐ **Długość 17.5 cm:** Idealna kontrola i wygoda pracy

☐ **Ergonomiczna budowa:** Stabilność i pewny chwyt w dłoni

☞ **Sterylizowalna:** Do autoklawu i środków chemicznych

W naszym sklepie mogą Państwo także zakupić pincety anatomiczne w rozmiarach: 11.5cm, 13cm, 14cm, 15cm, 16cm, 18cm, 20cm, 25cm, 30cm, 40cm, 50cm,

A także pincety, pęsety, pencety: [POTTS-SMITH](#), [GERALD](#), [CUSHING](#), [SEMKEN](#), [ADSON](#), [MICRO-ADSON](#), [CUSHING](#), [WACHENFELDT](#), [MERIAM](#), [LONDON-COLLAGE](#) i inne.

## Bezpieczeństwo

**OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.**

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

## Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:  
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,  
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan  
e-mail: [info@weldoninstruments.com](mailto:info@weldoninstruments.com)

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:  
CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania  
e-mail: [info@cmcmedicaldevices.com](mailto:info@cmcmedicaldevices.com)

☐ Importer i dystrybutor:  
F.H.U. MONAMED  
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo  
tel. 603-477-248  
e-mail: [monamed@monamed.pl](mailto:monamed@monamed.pl)

