

---

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/pinceta-chirurgiczna-peseta-chirurgiczna-1x2-zabki-wybor-rozmiarow-105cm-115cm-14cm-16cm-18cm-20cm-25cm-30cm-p-310.html>



## Pinceta chirurgiczna (pęseta chirurgiczna) 1x2 ząbki - (wybór rozmiarów: 10.5cm, 11.5cm, 14cm, 16cm, 18cm, 20cm, 25cm, 30cm)

Cena brutto **6,48 zł**

Cena netto **6,00 zł**

---

### Opis produktu

## Pinceta, pęseta chirurgiczna 1x2 ząbki

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu pęsetę chirurgiczną, która wykonana jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzia chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

#### Opis produktu

Pinceta chirurgiczna z końcówką typu 1x2 ząb to narzędzie przeznaczone do precyzyjnego chwytania tkanek podczas procedur medycznych. Dzięki odpowiednio wyprofilowanym końcówkom zapewnia stabilny uchwyt bez ryzyka nadmiernego uszkodzenia materiału biologicznego.

Produkt wykonany jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej, co gwarantuje odporność na korozję, trwałość oraz możliwość wielokrotnej sterylizacji. Ergonomiczna konstrukcja zapewnia komfort użytkowania nawet podczas długotrwałych zabiegów.

---

#### Najważniejsze zalety

- Wysoka precyzja chwytu dzięki końcówce 1x2 ząb
- Wykonana z trwałej stali nierdzewnej odpornej na korozję
- Długość - komfort pracy w głębszym polu operacyjnym
- Możliwość sterylizacji i wielokrotnego użytku
- Produkt spełnia wymagania dla wyrobów medycznych

---

#### Specyfikacja techniczna

- Długości dostępnych pincet **11.5cm, 13cm, 14cm, 15cm, 16cm, 18cm, 20cm, 25cm, 30cm, 40cm, 50cm**
- Typ końcówki: 1x2 ząb
- Materiał: stal nierdzewna
- Wielokrotnego użytku: tak
- Możliwość sterylizacji: tak (autoklaw)
- Klasa wyrobu: medyczny

---

#### Zastosowanie

---

Pinceta przeznaczona jest do zastosowań medycznych, w szczególności:

- zabiegi chirurgiczne
- procedury ambulatoryjne
- prace w laboratoriach medycznych
- zastosowanie w gabinetach specjalistycznych

---

#### △ Bezpieczeństwo i certyfikaty

- Wyrób medyczny zgodny z obowiązującymi przepisami UE
- Oznakowanie CE
- Produkt przeznaczony do użytku przez wykwalifikowany personel medyczny

#### Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- △ Przed użyciem należy przeprowadzić odpowiednią sterylizację
- △ Nie używać uszkodzonego narzędzia
- △ Stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem
- △ Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby niewykwalifikowane

#### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Długość:** 10.5cm , 11.5cm , 14cm , 16cm , 18cm , 20cm , 25cm , 30cm

#### Bezpieczeństwo

**OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.**

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszuszyć dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

#### Dane kontaktowe

Wytwórca:  
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,  
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan  
e-mail: info@weldoninstruments.com

---

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:  
CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania  
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:  
F.H.U. MONAMED  
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo  
tel. 603-477-248  
e-mail: monamed@monamed.pl