

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/pinceta-depilacyjna-littauer-85cm-do-brwi-rzes-i-wloskow-p-1150.html>

Pinceta depilacyjna LITTAUER 8.5cm, do brwi, rzęs i włosów



Cena brutto **9,90 zł**

Cena netto **8,05 zł**

Opis produktu

Pinceta depilacyjna LITTAUER 8.5cm, do brwi, rzęs i włosów

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu pincetę LITTAUER 8.5cm, która wykonana jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Wysokiej jakości precyzyjna pinceta LITTAUER depilacyjna do brwi i włosów wykonana z stali nierdzewnej. Wysoka jakość wykonania oraz wykorzystane materiały gwarantują funkcjonalność, wytrzymałość oraz wysoką odporność na korozję w warunkach użytkowania, dezynfekcji i sterylizacji. Specjalnie wyprofilowany płaski czubek pensety LITTAUER pozwala na pewne uchwycenie nawet bardzo krótkich włosów bez ryzyka ich ucięcia. Pinceta depilacyjna przeznaczona zarówno do użytku domowego jak i profesjonalnego, w okulistyce, w gabinetach kosmetycznych i trychologicznych.

☐☐ Najważniejsze zalety produktu

Precyzyjna pinceta depilacyjna LITTAUER o długości 8,5 cm została zaprojektowana z myślą o dokładnym usuwaniu pojedynczych włosów oraz precyzyjnych zabiegach kosmetycznych. Dzięki ergonomicznej konstrukcji zapewnia wygodny chwyt i wysoką kontrolę pracy.

- ✓ Precyzyjne końcówki ułatwiają chwytanie cienkich włosów
- ✓ Kompaktowy rozmiar 8,5 cm zapewnia wygodne użytkowanie
- ✓ Odpowiednia do brwi, rzęs i drobnych włosów
- ✓ Solidne wykonanie z materiałów przeznaczonych do wielokrotnego użytku
- ✓ Produkt posiada status wyrobu medycznego

☐☐ Opis produktu

Pinceta depilacyjna LITTAUER została wykonana z dbałością o precyzję i komfort użytkowania. Smukła konstrukcja oraz odpowiednio wyprofilowane końcówki umożliwiają dokładne chwytanie nawet cienkich i krótkich włosów.

Produkt sprawdzi się zarówno podczas codziennej pielęgnacji brwi, jak i przy precyzyjnych zabiegach kosmetycznych wymagających dokładności. Dzięki niewielkiemu rozmiarowi pinceta jest wygodna w przechowywaniu oraz łatwa do utrzymania w czystości.

Ergonomiczny kształt ogranicza zmęczenie dłoni podczas użytkowania, a stabilny chwyt zwiększa kontrolę nad wykonywanym zabiegiem.

☐☐ Specyfikacja techniczna

- ☐☐ Długość: 8,5 cm
- ☐☐ Typ produktu: pinceta depilacyjna
- ⚙ Model: LITTAUER
- ☐☐ Przeznaczenie: brwi, rzęsy, drobne włoski
- ☐☐ Możliwość dezynfekcji: tak
- ♻ Wielokrotnego użytku: tak
- ☐☐ Status: wyrób medyczny

☐☐ Zastosowanie

Pinceta przeznaczona jest do:

- ☐☐ Regulacji brwi
- ☐ Usuwania pojedynczych włosów
- ☐☐ Precyzyjnych zabiegów kosmetycznych
- ☐☐ Zastosowań wymagających dokładnego chwytu małych elementów

Produkt może być stosowany zarówno w warunkach domowych, jak i w gabinetach kosmetycznych zgodnie z przeznaczeniem.

☐☐ Bezpieczeństwo i certyfikaty

Produkt posiada status wyrobu medycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wyrobów medycznych.

- △ Przed użyciem należy upewnić się, że produkt jest czysty i zdezynfekowany.
- △ Produkt należy stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- △ Nie używać na podrażnionej, uszkodzonej lub zakażonej skórze.
- △ Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- △ W przypadku uszkodzenia końcówek należy zaprzestać użytkowania.

Wyrób przeznaczony do wielokrotnego użytku po odpowiednim oczyszczeniu i dezynfekcji.

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszuszyć dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

☐ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED

ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl