

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/pinceta-okulistyczna-beer100cm-depilacyjna-rzes-brwi-i-wlosow-p-480.html>



Pinceta okulistyczna BEER 10.0cm, depilacyjna rzęs, brwi i włosów

Cena brutto **18,33 zł**

Cena netto **14,90 zł**

Opis produktu

Pinceta okulistyczna BEER 10,0 cm – precyzyjna do rzęs, brwi i włosów

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu pincetę BEER 10.0cm, która wykonana jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Wysokiej jakości precyzyjna pinceta BEER depilacyjna do brwi i włosów wykonana z stali nierdzewnej. Wysoka jakość wykonania oraz wykorzystane materiały gwarantują funkcjonalność, wytrzymałość oraz wysoką odporność na korozję w warunkach użytkowania, dezynfekcji i sterylizacji. Specjalnie wyprofilowany płaski czubek pensety BEER pozwala na pewne uchwycenie nawet bardzo krótkich włosów bez ryzyka ich ucięcia. Pinceta depilacyjna przeznaczona zarówno do użytku domowego jak i profesjonalnego, w okulistyce, w gabinetach kosmetycznych i trychologicznych.

☐☐ Najważniejsze zalety produktu

Pinceta okulistyczna BEER 10,0 cm została zaprojektowana z myślą o precyzyjnych zastosowaniach wymagających dokładności i wygody użytkowania. Dzięki smukłej konstrukcji oraz precyzyjnie wyprofilowanym końcówkom umożliwia dokładne chwytanie cienkich włosów oraz precyzyjną pracę przy stylizacji brwi i rzęs.

- ✓ Precyzyjne końcówki ułatwiają chwytanie cienkich włosów
- ✓ Odpowiednia do rzęs, brwi i drobnych włosów
- ✓ Ergonomiczna konstrukcja zapewnia komfort użytkowania
- ✓ Długość 10 cm zwiększa kontrolę podczas pracy
- ✓ Produkt posiada status wyrobu medycznego

☐☐ Opis produktu

Pinceta okulistyczna BEER 10,0 cm to precyzyjne narzędzie przeznaczone do zabiegów wymagających dokładnego chwytu i wysokiej kontroli ruchów. Dzięki odpowiednio wyprofilowanym końcówkom umożliwia skuteczne usuwanie pojedynczych włosów oraz precyzyjną stylizację brwi i rzęs.

Smukła budowa oraz ergonomiczny kształt zapewniają wygodę użytkowania zarówno podczas codziennej pielęgnacji, jak i profesjonalnych zabiegów kosmetycznych. Produkt sprawdzi się w zastosowaniach wymagających dokładności oraz delikatnego operowania narzędziem.

Pinceta została wykonana z materiałów umożliwiających wielokrotne użytkowanie po odpowiednim oczyszczeniu i dezynfekcji.

☐☐ Specyfikacja techniczna

- ☐☐ Długość: 10,0 cm
- ☐☐ Typ produktu: pinceta okulistyczna
- ∞ Model: BEER
- ☐☐ Przeznaczenie: rzęsy, brwi, drobne włoski
- ☐☐ Możliwość dezynfekcji: tak
- ♻ Wielokrotnego użytku: tak
- ☐☐ Status: wyrób medyczny

☐☐ Zastosowanie

Pinceta przeznaczona jest do:

- ☐☐ Stylizacji i regulacji brwi
- ☐ Usuwania pojedynczych włosów
- ☐☐ Precyzyjnej pracy przy rzęsach
- ☐☐ Zabiegów kosmetycznych wymagających dokładności

Produkt może być stosowany zarówno w warunkach domowych, jak i profesjonalnych zgodnie z przeznaczeniem.

☐☐ Bezpieczeństwo i certyfikaty

Produkt posiada status wyrobu medycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi wyrobów medycznych.

- △ Przed użyciem produkt należy dokładnie oczyścić i zdezynfekować.
- △ Nie stosować na podrażnionej, uszkodzonej lub zakażonej skórze.
- △ Produkt należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- △ W przypadku uszkodzenia końcówek należy zaprzestać użytkowania.
- △ Produkt przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Wyrób przeznaczony do wielokrotnego użytku po odpowiednim oczyszczeniu i dezynfekcji.

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszuszyć dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

☐ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248

e-mail: monamed@monamed.pl