

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/pinceta-penseta-ostrokończasta-125cm-precyzyjna-p-470.html>



Pinceta, penseta ostrokończasta 12.5cm, precyzyjna

Cena brutto **9,61 zł**

Cena netto **8,90 zł**

Opis produktu

Pinceta ostrokończasta 12.5cm, precyzyjna

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu pincetę 12.5cm ostrokończastą, która wykonana jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Opis produktu

Profesjonalna **pinceta ostrokończasta 12.5 cm** to precyzyjne narzędzie chirurgiczne i kosmetyczne, idealne do **chwywania, podtrzymywania i manipulowania drobnymi elementami lub tkankami**. Jej **ostre i precyzyjnie zakończone końcówki** zapewniają pewny chwyt oraz maksymalną dokładność pracy.

Wykonana z **wysokiej jakości stali nierdzewnej chirurgicznej**, odpornej na korozję, dezynfekcję i sterylizację w autoklawie.

Doskonale sprawdza się w zastosowaniach:

- ☐ chirurgicznych
- ☐ kosmetycznych
- ☐ laboratoryjnych
- ☐ weterynaryjnych.

Specyfikacja techniczna

Cecha

Opis

Długość całkowita: 12.5 cm

Kształt końcówek: Ostrokończaste

Materiał: Stal nierdzewna chirurgiczna

Sterylizacja: Tak – autoklaw / środki chemiczne

Zastosowanie: Chirurgia, kosmetologia, laboratoria

Stan: Nowa

☐☐Najważniejsze cechy produktu

☐☐Cechy

☐☐Opis

☐☐**Wysokiej jakości stal nierdzewna:** Odporna na korozję i uszkodzenia mechaniczne

☐ **Precyzyjny chwyt:** Umożliwia manipulowanie nawet najmniejszymi elementami

☐☐**Ostrokończaste zakończenie:** Zapewnia maksymalną dokładność i kontrolę

☐ **Sterylizowalna:** Przystosowana do autoklawowania i dezynfekcji chemicznej

☐☐**Uniwersalne zastosowanie:** Idealna do chirurgii, kosmetyki i weterynarii

W naszym sklepie mogą Państwo także zakupić pincety anatomiczne w rozmiarach: 11.5cm, 13cm, 14cm, 15cm, 16cm, 18cm, 20cm, 25cm, 30cm, 40cm, 50cm,

A także pincety, pęsety, pencety: [POTTS-SMITH](#), [GERALD](#), [CUSHING](#), [SEMKEN](#), [ADSON](#), [MICRO-ADSON](#), [TAYLOR](#), [WACHENFELDT](#), [MERIAM](#), [LONDON-COLLAGE](#) i inne.

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl