

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/pinceta-stomatologiczna-meriam-155cm-zagieta-wybor-figury-fig1-fig2-fig3-p-506.html>



Pinceta stomatologiczna MERIAM 15.5cm, zagięta - (wybór figury: Fig.1, Fig.2, Fig.3)

Cena brutto	7,78 zł
Cena netto	7,20 zł

Opis produktu

Pinceta stomatologiczna MERIAM 15.5cm, zagięta

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu pincetę stomatologiczną MERIAM 15.5cm, która wykonana jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Posiadamy w sprzedaży dostępne pincety stomatologiczne MERIAM:

- **Fig.1, gładka,**
- **Fig.2, ryflowana,**
- **Fig.3.**

Certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

OPIS PRODUKTU

Profesjonalna **pinceta stomatologiczna MERIAM** o długości **15,5 cm (Fig. 2)** to niezawodne narzędzie wykonane z **wysokogatunkowej stali nierdzewnej**. Dzięki **ryflowanej powierzchni chwytającej** zapewnia pewny i precyzyjny uchwyt nawet w wilgotnym środowisku jamy ustnej.

Model **Fig. 1 (gładki)** doskonale nadaje się do chwytania, podawania i manipulowania drobnymi elementami w jamie ustnej podczas zabiegów stomatologicznych.

Zagięte końcówki pod kątem ok. **45°** ułatwiają dostęp do trudno dostępnych miejsc, co czyni tę pincetę idealnym wyborem do prac **zachowawczych, protetycznych i chirurgicznych**.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Model:** MERIAM
- **Długość:** 15,5 cm
- **Materiał:** stal nierdzewna (chirurgiczna)
- **Powierzchnia robocza:** ryflowana (antypoślizgowa)
- **Kąt zagięcia końcówek:** ok. 45°
- **Sterylizacja:** możliwość wielokrotnej sterylizacji w autoklawie
- **Zastosowanie:** stomatologia zachowawcza, protetyka, chirurgia stomatologiczna

ZASTOSOWANIE

- Do chwytania i podawania materiałów w jamie ustnej

□ Do manipulowania tamponikami, watkami, igłami lub elementami protetycznymi

□ Uniwersalne narzędzie do codziennej pracy w gabinecie stomatologicznym

□ ZALETY PRODUKTU

- Wykonana z wysokiej jakości stali chirurgicznej
- Odporna na korozję i uszkodzenia
- Doskonała ergonomia i precyzyjne wykonanie
- Łatwa do utrzymania w czystości i sterylizacji
- Wielokrotnego użytku

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj figury:: Fig.1, gładka , Fig.2 , Fig.3

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248

e-mail: monamed@monamed.pl