

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/raspator-langenbeck-dlugosc-180cm-p-530.html>



Raspator LANGENBECK, długość 18.0cm

Cena brutto **29,05 zł**

Cena netto **26,90 zł**

Opis produktu

RASPATOR LANGENBECK 18.0cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu raspator LANGENBECK 18.0cm, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Raspator - [narzędzie chirurgiczne](#) służące do oddzielania okostnej od kości, stosowane w chirurgii narządu ruchu.

Opis produktu

Raspator **Langenbeck 18.0 cm** to wysokiej klasy narzędzie chirurgiczne służące do preparowania, odwarstwiania oraz oddzielania tkanek.

- ✓ ergonomiczny uchwyt zapewniający precyzję
- ✓ solidna konstrukcja ze stali nierdzewnej
- ✓ odpowiednio wyprofilowana końcówka ułatwiająca pracę

Zastosowanie

Raspator przeznaczony do:

- odwarstwiania i odsuwania tkanek
- preparowania struktur anatomicznych
- zabiegów chirurgicznych w warunkach profesjonalnych

△ Produkt jest wyrobem medycznym — przeznaczony wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu medycznego.

Specyfikacja techniczna

- **Długość:** 18.0 cm
- **Materiał:** stal nierdzewna (medical grade)
- **Profil końcówki:** klasyczny Langenbeck
- ♻️ **Sterylizacja:** możliwa (autoklaw)

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl