

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/rozszerzadlo-maciczne-hegar-wybor-rozmiarow-1mm-2mm-3mm-4mm-5mm-6mm-7mm-8mm-9mm-10mm-11mm-i-dalej-co-1mm-do-rozmiaru-26mm-p-559.html>



Rozszerzadło maciczne HEGAR - (wybór rozmiarów: 1mm, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, i dalej co 1mm do rozmiaru 26mm)

Cena brutto **8,64 zł**

Cena netto **8,00 zł**

Opis produktu

Rozszerzadło maciczne HEGAR

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu rozszerzadło maciczne HEGAR, które wykonane jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Opis produktu

Oferuję **rozszerzadło maciczne HEGAR** wykonane ze stali nierdzewnej, przeznaczone do użytku medycznego zgodnie z obowiązującymi procedurami i wytycznymi. Instrument charakteryzuje się gładkim wykończeniem oraz wyprofilowanym kształtem zapewniającym kontrolę podczas użycia przez wykwalifikowany personel.

Wyrób medyczny do zastosowań ginekologicznych.

Specyfikacja techniczna

- **Typ:** rozszerzadło HEGAR
- **Profil:** gładkie
- **Materiał:** stal nierdzewna
- **Rodzaj produktu:** wyrób medyczny, instrument ginekologiczny wielokrotnego użytku

Czyszczenie i sterylizacja

- odporność na sterylizację parową
- kompatybilne z procesami sterylizacji chemicznej
- gładka powierzchnia ułatwia dezynfekcję i czyszczenie

Zastosowanie

(Użytkowanie wyłącznie przez osoby wykwalifikowane i uprawnione)

- procedury ginekologiczne
- zastosowania medyczne i diagnostyczne zgodnie z przeznaczeniem

W sprzedaży na innych aukcjach posiadamy następujące średnice rozszerzadeł macicznych HEGAR:

- 1mm,
- 2mm,
- 3mm,

-
- 4mm,
 - 5mm,
 - 6mm,
 - 7mm,
 - 8mm,
 - 9mm,
 - 10mm,
 - 11mm,
 - 12mm,
 - 13mm,
 - 14mm,
 - 15mm,
 - 16mm,
 - 17mm,
 - 18mm,
 - 19mm,
 - 20mm,
 - 21mm,
 - 22mm,
 - 23mm,
 - 24mm,
 - 25mm,
 - 26mm,

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: Ø1.0mm , Ø10.0mm , Ø11.0mm , Ø12.0mm , Ø13.0mm , Ø14.0mm , Ø15.0mm , Ø16.0mm , Ø17.0mm , Ø18.0mm , Ø19.0mm , Ø2.0mm , Ø20.0mm , Ø21.0mm , Ø22.0mm , Ø23.0mm , Ø24.0mm , Ø25.0mm , Ø26.0mm , Ø3.0mm , Ø4.0mm , Ø5.0mm , Ø6.0mm , Ø7.0mm , Ø8.0mm , Ø9.0mm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.

10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl