
Link do produktu: <https://www.monamed.pl/rozszerzadlo-urologiczne-van-buren-no-8-30-french-wybor-rozmiarow-266mm-333mm-4mm-433mm-533mm-6mm-666mm-733mm-8mm-866mm-9mm-p-560.html>



Rozszerzadło urologiczne VAN BUREN No. 8-30 (French) - (wybór rozmiarów: 2.66mm, 3.33mm, 4mm, 4.33mm, 5.33mm, 6mm, 6.66mm, 7.33mm, 8mm, 8.66mm, 9mm)

Cena brutto	31,96 zł
-------------	-----------------

Cena netto	29,59 zł
------------	-----------------

Opis produktu

Rozszerzadło urologiczne VAN BUREN

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu rozszerzadło urologiczne VAN BUREN, które wykonane są z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Opis produktu

Rozszerzadło urologiczne **VAN BUREN** to narzędzie stosowane w urologii do **delikatnego i bezpiecznego rozszerzania cewki moczowej** podczas procedur diagnostycznych lub terapeutycznych.

Charakterystyczne **zakrzywione, anatomiczne wyprofilowanie** ułatwia atraumatyczne wprowadzanie instrumentu, a wygładzona powierzchnia minimalizuje tarcie i zmniejsza dyskomfort pacjenta.

Wykonane w całości z **wysokogatunkowej stali nierdzewnej medycznej**, zapewnia długotrwałą wytrzymałość, odporność na korozję oraz pełną zgodność z częstą sterylizacją.

Najważniejsze cechy produktu

Rodzaj: Rozszerzadło VAN BUREN - zakrzywione, anatomiczne

Materiał: Stal nierdzewna medyczna

Powierzchnia: Gładko polerowana - atraumatyczna

Sterylizacja: Autoklawowalne

Trwałość: Odporne na korozję i intensywne użytkowanie

Przeznaczenie: Urologia, zabiegi diagnostyczne i terapeutyczne

☐☐ Specyfikacja techniczna

Cecha	Wartość
☐☐ Typ:	Rozszerzadło VAN BUREN
☐☐ Materiał:	Stal nierdzewna medyczna
☐☐ Powierzchnia:	Gładko polerowana
☐☐ Sterylizacja:	Autoklaw
☐☐ Zastosowanie:	Urologia

☐☐ Zastosowanie

- ✓ Rozszerzanie cewki moczowej
- ✓ Procedury diagnostyczne
- ✓ Zabiegi urologiczne
- ✓ Praktyka szpitalna i gabinetowa

W sprzedaży posiadamy następujące średnice rozszerzadeł urologicznych VAN BUREN:

- **NO. 8 (FRENCH) => Ø˜2.66mm,**
- **NO. 10 (FRENCH) => Ø˜3.33mm,**
- **NO. 12 (FRENCH) => Ø˜4.0mm, (na zdjęciu)**
- **NO. 14 (FRENCH) => Ø˜4.66mm,**
- **NO. 16 (FRENCH) => Ø˜5.33mm,**
- **NO. 18 (FRENCH) => Ø˜6.0mm,**
- **NO. 20 (FRENCH) => Ø˜6.66mm,**
- **NO. 22 (FRENCH) => Ø˜7.33mm,**
- **NO. 24 (FRENCH) => Ø˜8.0mm,**
- **NO. 26 (FRENCH) => Ø˜8.66mm,**
- **NO. 28 (FRENCH) => Ø˜9.33mm,**
- **NO. 30 (FRENCH) => Ø˜10.0mm.**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Średnica: NO.10, Ø3.33mm , NO.12, Ø4mm , NO.14, Ø4.33mm , NO.16, Ø5.33mm , NO.18, Ø6mm , NO.20, Ø6.66mm , NO.22, Ø7.33mm , NO.24, Ø8mm , NO.26, Ø8.66mm , NO.28, Ø9.33mm , NO.30, Ø10mm , NO.8, Ø2.66mm

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić,

nasmarować i poddać sterylizacji.

2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl