

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/skrobaczka-lyzeczka-uszna-buck-165cm-prosta-ostra-wybor-rozmiarow-p-311.html>



Skrobaczka, łyżeczka uszna BUCK 16.5cm, prosta ostra - wybór rozmiarów

Cena brutto **18,25 zł**

Cena netto **16,90 zł**

Opis produktu

Łyżeczka uszna BUCK 16.5cm, prosta ostra

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu oferujemy łyżeczkę uszną BUCK 16.5cm, prstaostra, które wykonane jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Dostępne rozmiary łyżeczek w sprzedaży:

- Fig.000 => średnica otworu Ø1.6mm, średnica zewnętrzna Ø2.3mm,
- Fig.0 => średnica otworu Ø2.0mm, średnica zewnętrzna Ø2.9mm,
- Fig.2 => średnica otworu Ø2.7mm, średnica zewnętrzna Ø3.9mm,
- Fig.4 => średnica otworu Ø3.5mm, średnica zewnętrzna Ø4.5mm.

Fig.000 Fig.0 Fig.2



Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Łyżeczka uszna BUCK 16.5cm, odgięta-ostra wykonana jest z wysokostopowej stali chirurgicznej, posiada znak CE. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rodzaj figury: No. 000 , No. 0 , No. 2 , No. 4

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

-
1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
 2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
 3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
 4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
 5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
 6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
 7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
 8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
 9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
 10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl