

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/uchwyt-raczka-trzonek-do-skalpela-nr-4-p-547.html>



## Uchwyt (rączka, trzonek) do skalpela nr 4

Cena brutto	<b>5,94 zł</b>
-------------	----------------

Cena netto	<b>5,50 zł</b>
------------	----------------

### Opis produktu

## RĄCZKA TRZONEK DO SKALPELA NR 4, 10.0cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu rączkę do skalpela nr 4, która wykonana jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

Rączka nr 4 pasuje do ostrzy nr: 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26

### Bezpieczeństwo

**OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.**

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

### Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:  
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,  
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan  
e-mail: [info@weldoninstruments.com](mailto:info@weldoninstruments.com)

☐ Autoryzowany przedstawiciel w UE:  
CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania

---

e-mail: [info@cmcmmedicaldevices.com](mailto:info@cmcmmedicaldevices.com)

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED

ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo

tel. 603-477-248

e-mail: [monamed@monamed.pl](mailto:monamed@monamed.pl)