

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/upychadlo-kulkowe-z-nakladaczem-stomatologicznym-srednica-kulki19mm-p-622.html>



## Upychadło kulkowe z nakładaczem stomatologicznym (średnica kulki:1.9mm)

Cena brutto	<b>8,10 zł</b>
Cena netto	<b>7,50 zł</b>

### Opis produktu

## Upychadło kulkowe z nakładaczem stomatologicznym (średnica kulki:1.9mm)

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu Upychadło kulkowe z nakładaczem stomatologicznym, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

### Opis produktu

Upychadło kulkowe z nakładaczem stomatologicznym o średnicy kulki 1,9 mm to profesjonalne narzędzie przeznaczone do precyzyjnej aplikacji, kondensacji oraz modelowania materiałów wypełniających.

Dwufunkcyjna konstrukcja umożliwi zarówno nakładanie materiału, jak i jego dokładne formowanie w ubytku. Kulista końcówka robocza pozwala na precyzyjne opracowanie materiału nawet w trudno dostępnych miejscach zapewniając wysoką kontrolę i komfort pracy.

Instrument wykonany jest z wysokogatunkowej stali chirurgicznej, co zapewnia trwałość oraz odporność na wielokrotne procesy dezynfekcji i sterylizacji. Ergonomiczny uchwyt wspiera komfort i kontrolę pracy.

### Najważniejsze zalety

- Precyzyjna aplikacja i modelowanie materiałów stomatologicznych
- Wysokiej jakości stal chirurgiczna odporna na korozję
- Kulka o średnicy 1,9 mm do pracy w małym polu zabiegowym
- Narzędzie wielokrotnego użytku - możliwość sterylizacji
- Funkcja 2w1: upychadło i nakładacz

### Specyfikacja techniczna

- Średnica kulki: 1,9 mm
- Materiał: stal chirurgiczna
- Typ: upychadło kulkowe z nakładaczem
- Wielorazowego użytku: tak
- Możliwość sterylizacji: tak (autoklaw)
- Klasa wyrobu: wyrób medyczny

### Zastosowanie

Narzędzie przeznaczone jest do zastosowań medycznych, w szczególności:

- 
- □□ w stomatologii zachowawczej i protetyce
  - □□ do aplikacji i modelowania materiałów wypełniających
  - □□ w gabinetach stomatologicznych i klinikach
  - □□ do pracy wymagającej wysokiej precyzji

Produkt przeznaczony wyłącznie do użytku przez wykwalifikowany personel medyczny.

---

## □□ Bezpieczeństwo i certyfikaty

- □□ Produkt spełnia wymagania dla wyrobów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami
- □ Oznakowanie CE
- △ Wyrób medyczny – stosować zgodnie z instrukcją użytkowania
- △ Przed użyciem należy przeprowadzić mycie, dezynfekcję i sterylizację
- △ Nie stosować w przypadku uszkodzenia końcówek roboczych
- △ Niewłaściwe użycie może prowadzić do uszkodzenia tkanek lub materiałów
- △ Produkt przeznaczony wyłącznie dla personelu medycznego

## Bezpieczeństwo

**OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.**

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

## Dane kontaktowe

### □ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,  
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan  
e-mail: info@weldoninstruments.com

### □ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania  
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

### □ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED  
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo  
tel. 603-477-248  
e-mail: monamed@monamed.pl