

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/wziernik-ginekologiczny-collin-pochwowy-metalowy-wybor-rozmiarow-p-629.html>



## Wziernik ginekologiczny COLLIN, pochwowy metalowy - wybór rozmiarów

Cena brutto **37,69 zł**

Cena netto **34,90 zł**

### Opis produktu

## Wziernik ginekologiczny COLLIN, pochwowy metalowy

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu wziernik ginekologiczny COLLIN, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

### Opis produktu

Wziernik **COLLIN** to klasyczne narzędzie ginekologiczne przeznaczone do badań, diagnostyki oraz drobnych zabiegów. Jego **dwuskrzydłowa, solidna konstrukcja** zapewnia stabilne i kontrolowane rozwarcie, umożliwiając komfortowy dostęp do pola zabiegowego.

Dzięki wykonaniu z **wysokiej jakości stali nierdzewnej medycznej**, wziernik jest odporny na korozję, wielokrotne użytkowanie oraz częste sterylizacje w autoklawie. Gładkie wykończenie minimalizuje ryzyko podrażnień i zapewnia maksymalny komfort pracy.

### Najważniejsze cechy produktu

- Typ:** Wziernik ginekologiczny COLLIN
- Materiał:** Stal nierdzewna medyczna
- Konstrukcja:** Stabilna, dwuskrzydłowa
- Regulacja:** Płynny mechanizm rozwarcia
- Sterylizacja:** Autoklawowalny
- Przeznaczenie:** Badania ginekologiczne / zabiegi ambulatoryjne

### Specyfikacja techniczna

| Cecha            | Wartość                        |
|------------------|--------------------------------|
| <b>Typ:</b>      | Wziernik ginekologiczny COLLIN |
| <b>Materiał:</b> | Stal nierdzewna medyczna       |

---

⚙ **Mechanizm:** Regulowane rozwarcie

☑ **Sterylizacja:** Autoklaw

☑ **Zastosowanie:** Diagnostyka i zabiegi ginekologiczne

---

## ☑☑ Zastosowanie

- ✓ Badania ginekologiczne
- ✓ Diagnostyka ambulatoryjna
- ✓ Zabiegi w gabinecie prywatnym i szpitalnym
- ✓ Ułatwienie dostępu do szyjki macicy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 100 x 35mm , 110 x 40mm , 85 x 30mm

## Bezpieczeństwo

**OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.**

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyścić, naoliwić i wysterylizować narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

## Dane kontaktowe

☐ Wytwórca:  
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,  
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan  
e-mail: info@weldoninstruments.com

---

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:  
CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania  
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:  
F.H.U. MONAMED  
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo  
tel. 603-477-248  
e-mail: monamed@monamed.pl