

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/wziernik-rektalny-sims-dlugosc-150cm-p-628.html>



## Wziernik rektalny SIMS, długość 15.0cm

Cena brutto	<b>106,92 zł</b>
Cena netto	<b>99,00 zł</b>

### Opis produktu

## Wziernik rektalny SIMS 15.0cm

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu wziernik doodbytniczy SIMS 15.0cm, który wykonany jest z wysokostopowej stali chirurgicznej. Narzędzie chirurgiczne wielokrotnego użytku, może być poddawane procesowi sterylizacji.

Narzędzia chirurgiczne posiadają certyfikaty: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

### Opis produktu

Wziernik rektalny SIMS o długości 15 cm to profesjonalne narzędzie medyczne umożliwiające dokładną inspekcję odbytu i kanału odbytniczego. Ułatwia diagnostykę oraz wykonywanie zabiegów proktologicznych, zapewniając bezpieczny i stabilny dostęp do tkanek.

Instrument wykonany jest z wysokogatunkowej stali chirurgicznej, odpornej na korozję i wielokrotne sterylizacje. Ergonomiczny kształt wspiera komfort i precyzję pracy w polu zabiegowym.

### Najważniejsze zalety

- Precyzyjna inspekcja odbytu i kanału odbytniczego
- Wysokiej jakości stal chirurgiczna odporna na korozję
- Długość całkowita 15 cm dla wygody i kontroli pracy
- Narzędzie wielokrotnego użytku - możliwość sterylizacji
- Profesjonalne narzędzie do zabiegów proktologicznych

### Specyfikacja techniczna

- Długość całkowita: 15 cm
- Materiał: stal chirurgiczna
- Typ: wziernik rektalny SIMS
- Wielorazowego użytku: tak
- Możliwość sterylizacji: tak (autoklaw)
- Klasa wyrobu: wyrób medyczny

### Zastosowanie

Wziernik przeznaczony jest do zastosowań medycznych, w szczególności:

- Diagnostyki i zabiegów proktologicznych
- Inspekcji odbytu i kanału odbytniczego
- W szpitalach, klinikach i gabinetach specjalistycznych
- Do użytku wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny

### Bezpieczeństwo i certyfikaty

- 
- □□ Produkt spełnia wymagania dla wyrobów medycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami
  - □ Oznakowanie CE
  - △ Wyrób medyczny - stosować zgodnie z instrukcją użytkowania
  - △ Przed użyciem należy przeprowadzić mycie, dezynfekcję i sterylizację
  - △ Nie stosować w przypadku uszkodzenia narzędzia
  - △ Produkt przeznaczony wyłącznie dla personelu medycznego

## Bezpieczeństwo

**OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.**

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszuszyć dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

## Dane kontaktowe

### □ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,  
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan  
e-mail: info@weldoninstruments.com

### □ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.  
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania  
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

### □ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED  
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo  
tel. 603-477-248  
e-mail: monamed@monamed.pl