

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/wziernik-uszny-gruber-dla-doroslych-zestaw-3-szt-fig2-4-p-1158.html>



Wziernik uszny GRUBER dla dorosłych - zestaw 3 szt, FIG.(2-4)

Cena brutto **24,73 zł**

Cena netto **22,90 zł**

Opis produktu

☐☐ Wziernik uszny GRUBER dla dorosłych zestaw 3 szt.

W naszym sklepie FHU MONAMED oferujemy Państwu wziernik GRUBER, który jest wykonany z wysokostopowej stali chirurgicznej. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

Certyfikat: EN ISO 13485:2016, posiada znak CE zgodnie z dyrektywą MDR Regulation (EU) 2017/745 oraz powiadomienie do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych oraz Produktów Biobójczych.

☐ Najważniejsze zalety

Wzierniki uszne HARTMANN to precyzyjne narzędzia diagnostyczne przeznaczone do badania przewodu słuchowego u dorosłych pacjentów. Zapewniają wygodę pracy, trwałość oraz możliwość wielokrotnej dezynfekcji.

☐☐ Opis produktu

Zestaw wzierników usznych GRUBER dla dorosłych składa się z 3 elementów o różnych rozmiarach, co umożliwia dopasowanie do indywidualnych potrzeb diagnostycznych. Wykonane z wysokiej jakości stali nierdzewnej, cechują się odpornością na korozję oraz długą żywotnością. Konstrukcja umożliwia łatwe utrzymanie w czystości i wielokrotne użytkowanie po odpowiedniej dezynfekcji. Wzierniki są kompatybilne z odpowiednimi narzędziami diagnostycznymi stosowanymi w otorynolaryngologii.

⚙️ Specyfikacja techniczna

- ☐☐ Zestaw: 3 sztuki
- ☐☐ Przeznaczenie: dla dorosłych
- ☐☐ Typ: wziernik uszny GRUBER
- ☐☐ Materiał: stal nierdzewna medyczna
- ☐☐ Wielokrotnego użytku: tak
- ☐☐ Możliwość sterylizacji: tak (zgodnie z zaleceniami)

☐☐ Zastosowanie

Produkt przeznaczony do profesjonalnego użytku w placówkach medycznych:

- ☐☐ badanie przewodu słuchowego
- ☐☐ diagnostyka otolaryngologiczna
- ☐☐ ocena stanu ucha zewnętrznego

☐☐ Bezpieczeństwo i certyfikaty

Produkt jest wyrobem medycznym przeznaczonym do stosowania przez wykwalifikowany personel.

- □□ Klasyfikacja: wyrób medyczny zgodny z przepisami UE
 - □ Oznakowanie CE (deklaracja zgodności producenta)
 - △ Przed każdym użyciem należy przeprowadzić proces dezynfekcji lub sterylizacji
 - △ Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem
 - △ Nie stosować w przypadku widocznych uszkodzeń
 - △ Przeciwwskazania: nie stosować w przypadku ostrych stanów zapalnych lub urazów ucha bez konsultacji lekarskiej
-

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wysusz dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl