

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/zestaw-narzedzi-chirurgicznych-maly-p-670.html>

Zestaw narzędzi chirurgicznych - mały



Cena brutto **95,00 zł**

Cena netto **87,96 zł**

Opis produktu

Zestaw narzędzi chirurgicznych - mały

Zestaw narzędzi chirurgicznych nr 1 - podstawowy, który składa się z narzędzi chirurgicznych wykonanych z wysokostopowej stali chirurgicznej, posiada znak CE. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

W skład zestawu wchodzi:

- Delikatne nożyczki operacyjne 11.5cm, Fig.2 zagięte - 1szt,
- Nożyczki METZENBAUM 14.0cm, ostre/ostre, proste - 1szt,
- Kleszczyki HARTMANN 10.0cm, proste - 1szt,
- Kleszczyki ROCHESTER-PEAN 13.0cm, proste - 1szt,
- Kleszczyki HALSTEAD-MOSQUITO 12.5cm, zagięte - 1szt,
- Pinceta SEMKEN 15.0cm- 1szt,
- Pinceta ADSON 12.0cm, 1x2zab - 1szt,
- Rączka do skalpela Nr. 4 - 1szt,
- Igłotrzymacz MAYO-HEGAR 14.0cm - 1szt.

Koszt zakupu narzędzi w zestawie jest o 5% tańszy, niż w przypadku zakupu tych narzędzi poza zestawem.

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszus dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycjo otwartej.
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:
Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:
CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:
F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl