

Link do produktu: <https://www.monamed.pl/zestaw-narzedzi-chirurgicznych-weterynaria-p-674.html>



Zestaw narzędzi chirurgicznych - weterynaria

Cena brutto **239,76 zł**

Cena netto **222,00 zł**

Opis produktu

Zestaw narzędzi chirurgicznych - weterynaria

Zestaw narzędzi chirurgicznych - weterynaria, który składa się z 20szt. narzędzi chirurgicznych wykonanych z wysokostopowej stali chirurgicznej, posiada znak CE. Produkt wielokrotnego użytku, może być poddawany procesowi sterylizacji.

W skład zestawu wchodzi:

- Rączka do skalpela dwustronna Nr 3 i 4, 16.0cm / 6 ¼" - 1szt
- Hak STRANDELL-STILLE 19.0cm - 1szt
- HACZYK KASTRACYJNY DWUSTRONNY - 1szt
- Kleszczyki HALSTEAD-MOSQUITO 12.5cm / 5", 1x2 ząb, zagięte - 2szt
- Kleszczyki HARTMANN 10.0cm / 4", proste - 2szt
- Igłotrzymacz MAYO-HEGAR 14.0cm / 5 ½" - 1szt
- Igłotrzymacz MATHIEU 14.0cm / 5 ½" - 1szt
- Spinak do serwet BACKHAUS 9.0cm - 4szt
- Nożyczki operacyjne standard 11.5cm / 5 ½", ostre/ostre proste - 1szt
- Nożyczki operacyjne MAYO 17.0cm / 6 ¾", zagięte - 1szt
- Kleszczyki ROCHESTER-PEAN 13.0cm / 5", proste - 2szt
- Pinceta ADSON-BROWN 12cm / 4¾" - 1szt
- Pinceta MICRO-ADSON 12.0cm / 4 ¾" - 1szt
- Pinceta SEMKEN 12.5cm / 5", zagięta - 1szt

Koszt zakupu narzędzi w zestawie jest o 5% tańszy, niż w przypadku zakupu tych narzędzi poza zestawem.

Bezpieczeństwo

OSTRZEŻENIE. Użycie w celu innym niż wynikający z nazwy lub przeznaczenia może uszkodzić narzędzie i stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia.

Prosimy o ścisłe przestrzeganie niniejszej instrukcji w celu zapewnienia dłuższego i lepszego wykorzystania narzędzi.

1. Nowo zakupione narzędzia przed pierwszym użyciem należy: rozkonserwować, wyczyścić, nasmarować i poddać sterylizacji.
2. Po użyciu wyczyść, naoliw i wysterylizuj narzędzia.
3. Delikatne narzędzia można czyścić ultradźwiękami.
4. Po oczyszczeniu opłucz narzędzia najlepiej wodą destylowaną.
5. Wyszuszyć dokładnie po opłukaniu.
6. Nasmaruj zawiasy i zamki.
7. Sterylizuj narzędzia w pozycji otwartej.

-
8. Standardowa temperatura pary w autoklawie: 134°C.
 9. Temperatura sterylizacji od 160°C do 200°C.
 10. Sterylizacja gazowa od 50°C do 70°C.

Skorodowane narzędzia należy natychmiast odłączyć od reszty narzędzi.

Dane kontaktowe

□ Wytwórca:

Weldon Instruments, Ganjay Wali Street, Rai Pur Stop,
Wazirabad Road, 51310-Sialkot, Pakistan
e-mail: info@weldoninstruments.com

□ Autoryzowany przedstawiciel w UE:

CMC Medical Devices & Drugs S.L.
C/Horacio Lengo, 18. 29006, Malaga, Hiszpania
e-mail: info@cmcmedicaldevices.com

□ Importer i dystrybutor:

F.H.U. MONAMED
ul. M. Konopnickiej 11, 05-120 Legionowo
tel. 603-477-248
e-mail: monamed@monamed.pl